


## – Изделие за вакуумно почистване на носа –

- Изделието всмукващ накрайник
- Изделието осигурява постоянна сила на всмукване 0,2 бара – безопасна независимо от мощността на прахосмуквачката.
- Приборът може да се разглоби на 5 части и се почиства изключително лесно под течаща вода.
- Може да се стерилизира с изваряване или накисване в стерилизираща течност (всички части на прибора са изработени от температуроустойчив материал).
- При правилна употреба секретът не може да попадне в налягането на прибора, нито в маркуча на прахосмуквачката.
- Правилна употреба: всмукващият накрайник с държи в ръката така, че силиконовата тръбичка да сочи нагоре (вж. приложеното изображение).
- Можете да изберете от какъв материал да е изработено изделие – пластмаса или стъкло.
- Предлага се също пластмасов набор, който съдържа, два всмукващи накрайника и една четка за почистване.
- Не съдържа вредни за здравето материали. • Високо качество на добра цена. • Препоръчва се от педиатри и специалисти уши-нос-гърло.

### Частите на изделието за вакуумно почистване на носа

#### Пластмаса

- Всмукващ накрайник
- Контейнер за секрет (вътрешен цилиндричен контейнер, който може да се отдели от всмукващия накрайник; външен контейнер, към който се прикрепя всмукващият накрайник, а от страни – силиконовата тръбичка)
- Силиконова тръбичка (гъвкава) • Камбанообразен конектор за прахосмуквачка

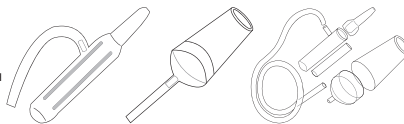

### Вакуумно почистване на носа – стъпки

1. Предварителна подготовка: Включете прахосмуквачката в мрежата (включете кабела в контакта), след което я поставете в близост до мястото, където ще се извършва почистването, така че да можете да я включите с ръка или с крак.
2. Сгложете прибора, като следвате приложеното изображение, и поставете камбанообразния конектор в маркуча на прахосмуквачката. Сега остава само да включите прахосмуквачката.
3. Капнете физиологични солени капки за нос в двете ноздри на бебето. (Соленият разтвор с концентрация 0,9% е физиологичен, съставът му е идентичен с този на сълзите. Не щипе, не дразни, само овлажнява и разреджа секретта.) След 3 минути отстраняването на навлажнената носна лигавица и разреждания секрет може да започне. Скапките се разтваря секретът, засъхнал по стените на носната кухина; така вакуумното почистване на носа може да бъде извършено безопасно, без да се нанасява лигавицата.
4. Заемете правилно положение на тялото в зависимост от възрастта на детето.



### Вакуумно почистване на носа при новородени и кърмачета

4. а.) Повдигаме бебето до полуседж, като придръжаме гърба с лявата предмишница и държим главата изправена в дланта си. Важно е бебето да не е легнало и главата му да не е наклонена назад, защото това ще затрудни отстраняването на секретта. В такива случаи секретът се стича към гърлото. Ако положението на тялото е правилно, секретът се стича към носа, като по този начин се улеснява бързото му и ефективно отстраняване.
- При новородените и кърмачетата все още няма толкова обилен и гъст секрет, за да се налага пълен вакуум, така че не е нужно да се притиска другата ноздра. Това и без друго би било невъзможно при деца на тази възраст, тъй като щом в едната ноздра бъде поставен приборът за вакуумно почистване, а другата ноздра бъде затворена, бебето веднага ще отвори уста.



### Вакуумно почистване на носа при малки деца

4. б.) Сложете детето да седне в скута ви с гръб към вас. Ако е необходимо, стиснете краката му между вашите крака. Ако има кой да ви помогне, той може да държи ръцете на детето, в случай че то се съпротивява. Помолете детето да наведе глава напред – това ще подпомогне отстраняването на секретта.

В тази възраст, ако детето е в състояние да ви съдейства, може да притиснете другата ноздра с пръсти; това ще доведе до образуване на пълен вакуум и по-бързо почистване на носа. Пълният вакуум води до по-ефективно и бързо почистване на носа, но не е задължителен. Той може да е полезен, когато детето е в състояние да съдейства. Помолете детето да не отваря уста, докато не завършите почистването на носа; така ще приключите по-бързо.

Какво представлява вакуумното почистване на носа: при затварянето на ноздрата в носа се образува вакуум, поради което секретът преминава от средния назален проход в общия назален проход. Така, след като освободим ноздрата, можем да отстраним секретта от общия назален проход. Това е много важно, когато секретът е гъст. Течният секрет се стича от само себе си от средния в общия назален проход, откъдето с помощта на прибора за вакуумно почистване на носа може да се отстрани лесно без пълен вакуум. Преди вакуумното почистване на носа във всички възрасти е задължително използването на капки за нос!



5. Включете прахосмуквачката. Благодарение на конструкцията си изделието за вакуумно почистване на носа има постоянна сила на всмукване 0,2 бара, която е напълно безопасна дори при почистване на носната кухина на новородено.

6. Поставете всмукващия накрайник в ноздрата.

### Поставяне на изделието в ноздрата и правилна употреба

Хванете всмукващия накрайник с дясната ръка, така че силиконовата тръбичка да сочи нагоре (вж. изображението на кутията). Това е важно, за да се предотврати стичането на секрет към тръбичката. Така изделие то ще остане чисто и ще трябва да измиете само всмукващия накрайник и контейнерът, но не и силиконовата тръбичка. Поставяте всмукващия накрайник в ноздрата толкова дълбоко, колкото позволява конусовидният връх. Не е необходимо да вкарвате прибора много дълбоко и да натискате, тъй като това не влияе на ефективността. Дръжте всмукващия накрайник наклонен надолу и настрани, така че да можете да отстраните секретта без остатък.

Един непрекъснат курс на почистване не бива да продължава повече от 5 секунди. Ако това не е достатъчно, 5-секундните курсове трябва да се редуват с 3-5 секундни почивки. Почистването продължава, докато контейнерът не спре да се пълни със секрет.

7. Махнете прибора от ноздрата.

8. Изключете прахосмуквачката.

9. Ако е необходимо, изтрийте капките за нос или секретта, събрал се около носа, с мека носна кърпа.

10. Ако е необходимо, нанесете около носа на бебето тънък слой крем Sudocrem, за да предотвратите зачервяването или дразненето, които секретът може да причини.

11. Откачете изделието от прахосмуквачката.

12. Разгложете всмукващия накрайник и го измиете под течаща вода. Ако е необходимо, може да го изварите или да го стерилизирате по друг начин (напр. като го накиснете в стерилизираща течност). При почистване свалете всмукващия накрайник от контейнера. За по-ефективно почистване може да разглобите и всмукващия накрайник. Изделието за вакуумно почистване на носа може да се разглоби на 5 части, което до голяма степен улеснява почистването и повишава стерилността.

13. След като частите на изделието изсъхнат, ги оставете на чисто място, така че следващия път да можете да ги използвате веднага.



Изделието за вакуумно почистване на носа е тествано от Института за болнична техника и развитие на качеството на медицинските изделия.

Дистрибутор: **Цеумед ЕООД** 1113 София ул. Акад. Методи Попов No 22А, БЪЛГАРИЯ



Ranyák György  
H-1094 Budapest, Tompa u. 15/B  
1011 www.ranyak.eu