

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАНИ

Област на приложение: Разтвор без алкохол за почистване, овлажняване и заздравяване на остри рани.

Състав: Съдържащ електролити разтвор, полихексанид 0,02 %

Приложение:

SOS Спрей за почистване на рани да се напръска непосредствено след нараняването върху раната. При нужда да се повтори многократно на ден. За максимални резултати да се постави пластир или превръзка и да се държи влажен със SOS Спрей за почистване на рани. За по-добро охлаждащо действие SOS Спрей за почистване на рани може да бъде съхраняван преди приложение в хладилника. Подходящ за деца.

Ограничение на приложението:

Бременност и кърмене: Да се прилага само след консултация с лекар.

Деца под 2-годишна възраст: Да се прилага само след консултация с лекар.

Взаимодействия: Да не се използва в комбинация с анионни тензиди.

Противопоказания:

Да не се използва при известни алергии към някои от съставните части.

Странични действия:

Не са известни.

Общи указания за безопасност:

- Само за външно приложение при остри рани.
- Да се използва само при неповредена опаковка.
- След използване спрят да се затвори.
- Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Съхранение/Минимален срок на годност:

Да се съхранява на недостъпно за деца и домашни животни място.

Да се съхранява на прохладно, сухо място и защитен от директна слънчева светлина.

Срок на годност: 12 месеца след отваряне

Съдържание: 50 ml.



Спазвайте пълните указания и противопоказания в настоящото ръководство за употреба и редовно проверявайте мястото на приложение!



Код на партидата: отпечатано върху опаковката и дъното на флакона. Да се използва до: отпечатано върху дъното на флакона.



Да се пази от слънчева светлина



Да се използва до: отпечатано върху дъното на флакона



0297 Медицинско изделие.



Производител: д-р Клайне Фарма ГмбХ, ул. Опалщрасе 1, D-33739 Билефелд

Вносител и дистрибутор за България: Ти Ейч Би Дистрибушън ООД

Варна 9009, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1, тел: +359 52 731 187, e-mail: office@thbd-bg.com

Дата на последната актуализация на информацията: Юли 2017 г.