

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

## ГЕЛ ЗА РАНИ

**Област на приложение:** За овлажняване и зарастване на остри рани, като напр. разкъсни и порезни рани, изгаряния 1-ва и 2-ра степен.

**Състав:** Съдържащ електролити гел, стабилизирани с EDTA; полихексанид 0,02 %

### Приложение:

Най-напред раната трябва да бъде внимателно почистена, да не сълзи и да не кърви повече. След това SOS Гел за рани и зарастване на рани се нанася върху обострената рана. При необходимост да се повтаря многократно на ден. За покриване може да бъде използван пластир или превръзка.

### Ограничения за приложение:

Бременност и кърмене: Да се прилага само след консултация с лекар.

Кърмачета и малки деца: Да се прилага само след консултация с лекар.

### Противопоказания:

Да не се използва при известни алергии към полихексанид или бензил алкохол.

Да не се използва в комбинация с анионни тензиди.

### Указания:

След употреба тубичката да се затваря.

Датата на годност и номерът на партидата са отпечатани на долната страна на картонената кутия и сгъвката на тубата.

Да не се използва след изтичане на датата на годност.

Да се използват само неповредени туби.

Да се съхранява на подсигурано от деца място.

Само за външно приложение.

Не са известни странични действия.

Подходящо за деца.

**Срок на годност:** 3 месеца след отваряне

**Съдържание:** 30 g



Спазвайте пълните указания и противопоказания в настоящото ръководство за употреба и редовно проверявайте мястото на приложение!



Номер на партида



Срок на годност



Да се пази от слънчева светлина



Да се използва до



0086 Медицинско изделие.



**Производител:** д-р Клайне Фарма ГмбХ, ул. Опалщрасе 1, D-33739 Билефелд



**Вносител и дистрибутор за България:** Ти Ейч Би Дистрибушън ООД

Варна 9009, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1, тел: +359 52 731 187, e-mail: office@thbd-bg.com

**Дата на последната актуализация на информацията:** Юли 2017 г.